

GEBRUIKSAANWIJZING



FYSIC[®]

FX-3800

INTRODUCTIE

De FX-3800 is een comforttelefoon met uitgebreide functies om ook met name mensen met een gehoor of zichtbeperking te ondersteunen.

Zichtondersteuning:

- Grote toetsen met contrasterende nummers.
- Verlicht display met grote karakters.
- Bij het indrukken van de toetsen en tijdens het instellen tevens gesproken ondersteuning.
- Mogelijkheid om bij geheugennummers de betreffende naam in te spreken. Bij het geheugenzoeken worden deze dan uitgesproken.

Gehoordersteuning:

- Extra luide bel.
- Regelbaar hoornvolume.
- Activatie gehoorapparatuur.

Naast deze uitgebreide telefoonfuncties geeft de FX-3800 de mogelijkheid om automatisch een aantal mensen, tot maximaal 30, te bellen indien u hulp nodig heeft.

- Alarmactivatie direct op telefoontoestel of via meegeleverde afstandsbediening.

- Door u te bepalen personen worden gebeld, in de door u aangegeven volgorde.
- Indien de alarmoproep niet beantwoord wordt, dan wordt de volgende persoon gebeld.
- Automatische inschakeling van de luidsprekerfunctie.

Indien u dus hulp nodig heeft en op de rode 'SOS' knop op uw telefoontoestel óf op de rode 'SOS' knop op de afstandsbediening drukt dan zullen deze mensen één voor één gebeld worden en krijgen dan uw ingesproken alarmboodschap te horen.


Zodra een opgebeld persoon daadwerkelijk reageert, kan hij op afstand de handenvrij functie van uw telefoon inschakelen en voor zover mogelijk met u overleggen en hulp regelen.

Op deze manier bent u niet afhankelijk van officiële alarmcentrales met hun maandelijkse abonnementskosten en kunt u ook hulp inroepen voor de wat minder dringende zaken.


INSTALLATIE:

In het geval u niet bekend bent met het installeren van deze telefoon, dan verwijzen wij u naar pagina 38 en verder.

OVERZICHT TELEFOON

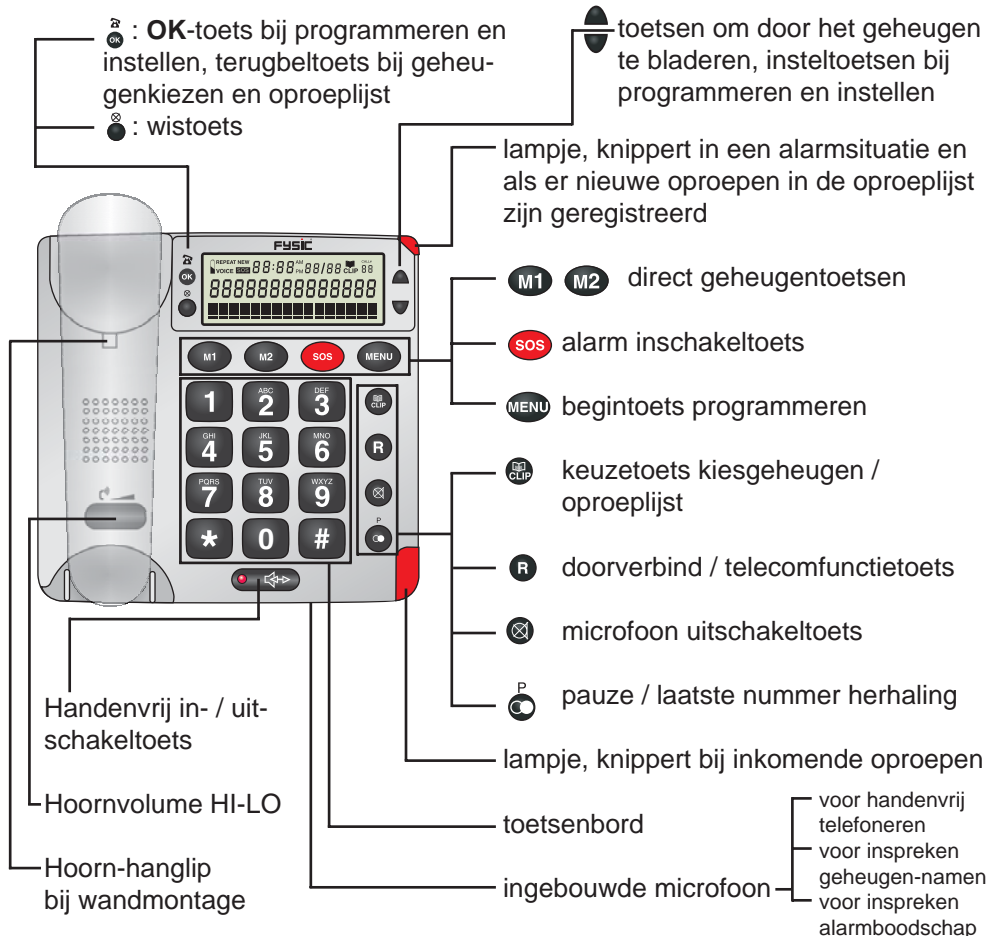


OVERZICHT DISPLAY

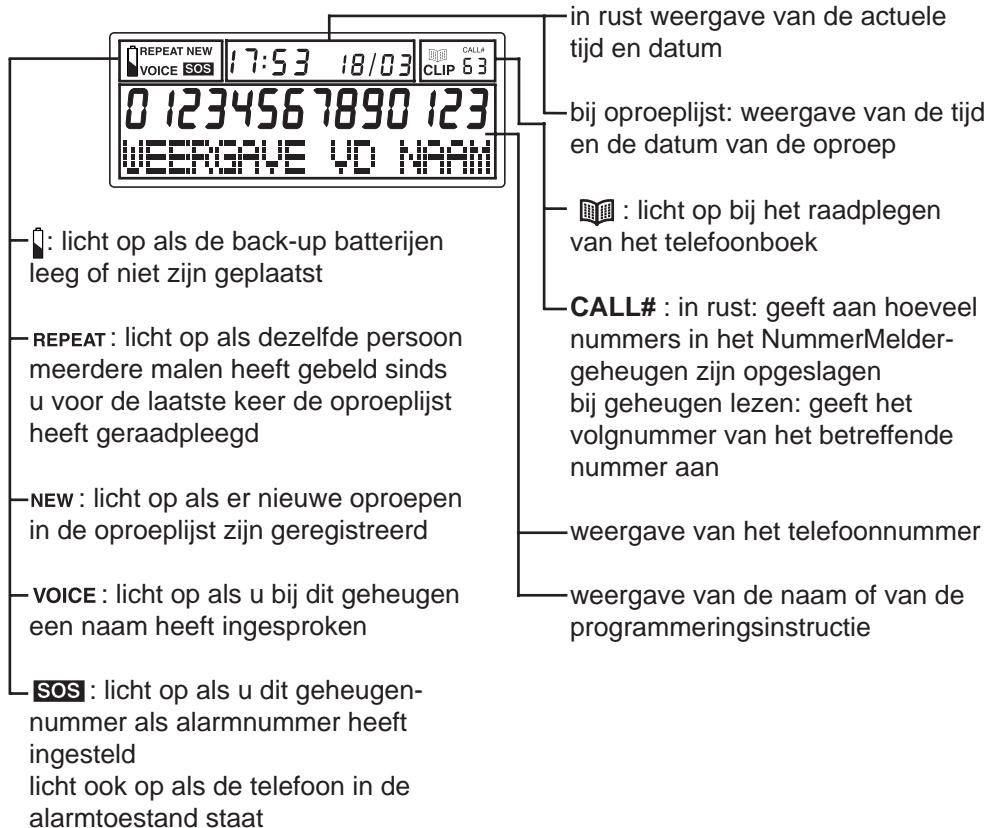

TELEFONEREN

Belvolume:

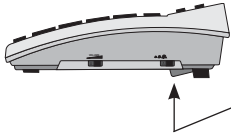

bel zacht



bel normaal



bel luid

Oproep aannemen:



de hoorn
opnemen om het
gesprek via de
hoorn te voeren

of



de luidsprekertoets
indrukken om het
gesprek handenvrij
te voeren

of



op de afstands-
bediening kort op
de rode toets druk-
ken om het gesprek
handenvrij aan te
nemen

Verbinding verbreken:



de hoorn
neerleggen
om het gesprek
via de hoorn te
beëindigen

of



nogmaals de
luidsprekertoets
indrukken om het
handenvrij gesprek
af te sluiten

of



nogmaals kort
op de rode
toets drukken om
het handenvrij ge-
sprek af te sluiten

Nummer kiezen:

Normaal:



de hoorn opnemen of de luidsprekerfunctie inschakelen



het nummer intoetsen

Blokkiezen:



het nummer intoetsen



uit de luidspreker klinkt het nummer dat u intoetst




gebruik de wistoets om een fout te corrigeren



de hoorn opnemen of de luidsprekerfunctie inschakelen, het nummer wordt nu gekozen

Gespreksvolume:

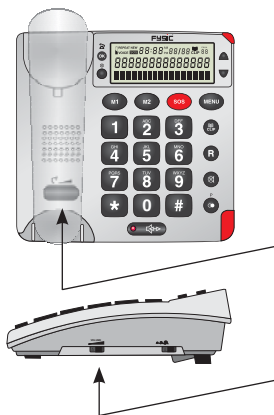

versterkt het volume van de hoorn

regelt het volume van de luidspreker

Nummerherhaling:



de hoorn opnemen of de luidsprekerfunctie inschakelen



het laatst gekozen nummer wordt nogmaals gekozen

Kiespauze:



druk, tijdens het intoetsen van het telefoonnummer, op deze toets om een kiespauze toe te voegen (bijvoorbeeld na de -0- indien u telefoneert via een huiscentrale)

R-toets (FLASH):



om gesprekken door te verbinden indien u
telefoneert via een huiscentrale

of

voor telecomdiensten (om bijvoorbeeld een
WisselGesprek aan te nemen)

Ruggespraak:



druk deze toets in om de microfoon uit te scha-
kelen zodat u kunt overleggen met huisgenoten
zonder dat uw gesprekspartner aan de telefoon
meeluistert

| zodra u deze toets loslaat is de microfoon
| weer ingeschakeld

Gesprekstimer:



tijdens het gesprek wordt de gespreksduur op
het display bijgehouden

TELEFOONBOEK

Toevoegen:

Attentie: het toevoegen van een geheugen geschiedt in 5 stappen:

1. invoeren van het telefoonnummer
2. toevoegen van de naam (voor in het display)
3. aangeven of het een ALARM-nummer is
4. instellen wanneer (als 1^e, als 2^e, als 3^e, etc) dit nummer moet worden gekozen in geval van alarm
5. inspreken van de naam (voor de luidsprekerfunctie)

5x



“TELEFOONBOEK INSTELLEN”
op display: [NUMMER BEWAREN]



OK toets drukken

1



telefoonnummer invoeren
sluit af met **OK** toets

2



naam invoeren (zie ook pagina 17)
sluit af met **OK** toets

3



geef aan of dit een alarmnummer betreft
[BIJ NOOD BELLEN] [GEEN NOODNUMMER]



[NOOD VOLGORDE]

4



geef aan op welke plaats dit nummer
gekozen moet worden in geval van alarm



“BEWAARD”

op display: [BEWAARD]

5

3 sec



houd de **OK**-toets ingedrukt, na de beeptoon heeft u 3 seconden om de naam van de abonnee in de ingebouwde microfoon in te spreken (toets **OK** ingedrukt houden gedurende de opname)



voer het volgende geheugen in
of



keer terug naar de ruststand van de telefoon

Telefoonboek openen:

1x / 2x



druk 1 of 2x op toets **CLIP** zodat "TELEFOON BOEK" klinkt en het symbool  oplicht




blader door het geheugen
indien u een naam heeft ingesproken, dan wordt deze afgespeeld, anders wordt het telefoonnummer uitgesproken

het display geeft de volgende informatie:

als **VOICE** oplicht dan heeft u bij dit geheugen een naam ingesproken

als **SOS** oplicht dan heeft u dit nummer als alarm-nummer ingesteld

aanduiding op welke plaats dit nummer in geval van alarm wordt gekozen

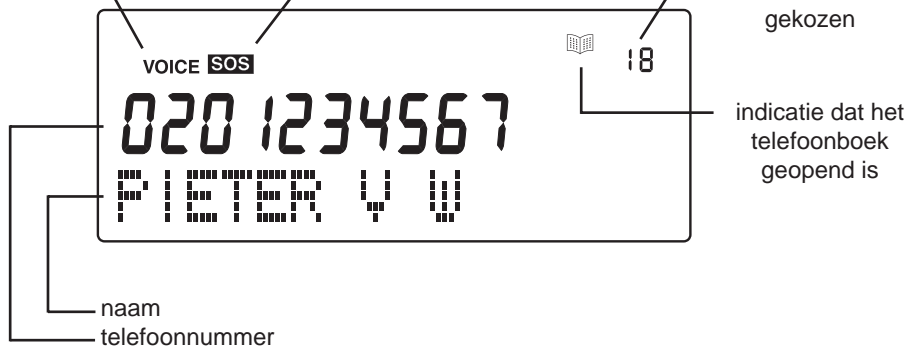

indicatie dat het telefoonboek geopend is

Geheugen kiezen:



open het telefoonboek en zoek het te kiezen nummer op



de handenvrij functie wordt ingeschakeld en het nummer wordt gekozen (de hoorn opnemen om het gesprek via de hoorn voort te zetten)

Geheugen wissen:

per nummer:



open het telefoonboek en zoek het te wissen nummer op

kort 



“WISSEN”

op display: [WISSEN?]

3 sec 



na 3 seconden: “GEWIST”

gehele geheugen:



open het telefoonboek en zorg dat er een nummer in het display verschijnt

5 sec 



“WISSEN?”

op display: [WIS ALLES]

5 sec 



“GEWIST” gevolgd door “LEEG”

Geheugen corrigeren / wijzigen:



open het telefoonboek en zoek het te corrigeren nummer op

3 sec



“BEWERKEN”

op display: [BEWERKEN]



het eerste cijfer van het nummer knippert



wis het oude nummer, voer het nieuwe nummer in en druk op de **OK**-toets



herhaal dit voor de naam



stel het nummer al of niet in als alarm-nummer



wijzig eventueel de volgorde waarop dit nummer bij alarm gekozen moet worden



“BEWAARD”

op display: [BEWAARD]

Gesproken naam bij geheugens toevoegen of wijzigen:

6x



“TELEFOONBOEK NAAM OPNEMEN”
op display: [NAAM OPNEMEN]

OK



druk op toets **OK** en zoek het betreffende geheugen op

3 sec



na de beeptoon heeft u 3 seconden de tijd om de naam van de abonnee in te spreken (toets **OK** ingedrukt houden gedurende de opname)



keer terug naar de ruststand van de telefoon

Gesproken naam bij geheugens wissen:

6x



“TELEFOONBOEK NAAM OPNEMEN”
op display: [NAAM OPNEMEN]

OK



druk op toets **OK** en zoek het geheugen op






druk, tijdens het uitspreken van de naam, op de wis-toets (☒) het woordje ‘VOICE’ dooft en de naam is gewist



keer terug naar de ruststand van de telefoon

Tips en opmerkingen betreffende de geheugens:

- * de geheugencapaciteit bedraagt 30 geheugens van maximaal 22 cijfers voor het nummer en 16 karakters voor de naam
- * de geheugens worden op alfabetische volgorde opgeslagen
- * een kiespauze kan met toets  ingevoegd worden
- * een foutieve invoer kan met toets  gewist worden
- * in het geval er geen nummers in het geheugen zijn opgeslagen, dan verschijnt [*LEEG*] in het display na het drukken op toets 
- * bij het raadplegen van het geheugen verschijnt aan het einde van de lijst [*EINDE LIJST*] in het display
- * als alarmnummer kunt u naast de telefoonnummers van de dokter en van familie of burens, ook de mobiele nummers van GSM telefoons programmeren
- * het is te adviseren om de abonnees van de alarmnummers in te lichten over deze telefoon, zie ook pagina 25

De naam wordt toegevoegd door middel van de toetsen van de telefoon.
de volgende karakters zijn mogelijk

toets	karakter na .. indrukken:					
	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	spatie	+	&	-	/	1
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	,	.	:	;	?	0
*	'	@	()	*	
#	\$	_	%	!	#	

DIRECT GEHEUGEN M1 EN M2

De direct geheugentoetsen M1 en M2 zijn geschikt voor nummers die u in geval van nood snel moet kunnen kiezen. Let op dat u deze nummers NIET als alarmnummer kunt instellen, deze worden dus niet automatisch in een alarmsituatie gekozen.

Geheugen programmeren:



“TELEFOONBOEK INSTELLEN”
op display: [NUMMER BEWAREN]



OK toets drukken



telefoonnummer invoeren
sluit af met **OK** toets



naam invoeren (zie ook pagina 17)



druk op toets **M1** of **M2**

Geheugen kiezen:



de hoorn opnemen of de luidsprekerfunctie inschakelen



het betreffende nummer wordt gekozen

Geheugen corrigeren:

U kunt een direct geheugennummer niet corrigeren of wijzigen. Wel kunt u een nieuw nummer over het oude nummer programmeren, het oude nummer komt dan te vervallen.

Geheugen wissen:

Het is niet mogelijk om een direct geheugen te wissen. Wel kunt u een niet bestaand nummer (bijvoorbeeld alleen de -0-) programmeren.

Specificaties:

- * een direct geheugennummer kan maximaal 22 cijfers lang zijn, de naam kan maximaal 16 karakters lang zijn
- * direct geheugennummers worden **NIET** automatisch in een alarm-situatie gekozen

ALARMFUNCTIE

werking:

LET OP DAT DE ALARMFUNCTIE ALLEEN KAN FUNCTIONEREN ALS DE VOEDINGSADAPTER IS AANGESLOTEN EN/OF VOLLE BATTERIJEN GEPLAATST ZIJN!

In het geval van een alarmsituatie kunt u door middel van de rode SOS-toets op de afstandsbediening of via de SOS toets op de telefoon, de telefoon in een alarm-toestand brengen.

Om vals alarm te voorkomen dient u de alarm-toets langer dan 1 sec. ingedrukt te houden.

Een alarm kan te allen tijde onderbroken worden door de hoorn even op te nemen en weer neer te leggen

In een alarmsituatie reageert de telefoon als volgt:

1. gedurende 15 seconden klinkt er een alarmsignaal uit de telefoon zodat personen in de nabijheid hulp kunnen bieden
2. na deze periode stopt het alarmsignaal en wordt het continu afspelen van de alarmboodschap gestart, tevens wordt het 1^e alarmnummer gekozen



3. als de oproep wordt beantwoord:

- a. de opgebeldde persoon moet op zijn telefoon op toets 0 drukken, de alarmboodschap wordt gestopt en gedurende 3 minuten kan er handenvrij gecommuniceerd worden
- b. indien deze persoon binnen 3 minuten op zijn telefoon op toets -1- en dan op toets -2- drukt, dan wordt de alarmtoestand uitgeschakeld en blijft de handenvrij verbinding **CONTINU** in stand
- c. indien er niet binnen 3 minuten op toets -1- en dan op toets -2- gedrukt wordt, dan wordt de verbinding verbroken en wordt het volgende alarmnummer gekozen

als de oproep niet binnen 60 seconden wordt beantwoord:

- a. de telefoon beëindigt de oproep
- b. de persoon die als volgen de op de alarmlijst staat wordt gebeld
- c. dit wordt herhaald totdat een van de opgebeldde personen op zijn toestel op toets 0 drukt (zie verder 3a hiernaast) of totdat alle personen uit de alarmlijst zijn gebeld
- d. de telefoon wacht 1 minuut waarna de hele cyclus herhaald wordt; de cyclus wordt herhaald totdat het alarm wordt uitgeschakeld

Alarmboodschap:

De alarmboodschap is de boodschap die afgespeeld wordt in een alarm-situatie. U kunt gebruik maken van de voorgeprogrammeerde alarmboodschap of een eigen alarmboodschap inspreken:

Voorgeprogrammeerde alarmboodschap:

“DIT IS EEN NOODOPROEP, KIES EEN NUL OM TE ACCEPTEREN”

Opnemen eigen alarmboodschap:

7x



“NOODBOODSCHAP OPNEMEN”
op display: [BOODSCHAP OPN.]

20 sec



houd de **OK**-toets ingedrukt, na de beeptoon heeft u 20 seconden de tijd om de alarmboodschap in de ingebouwde microfoon in te spreken (toets **OK** ingedrukt houden gedurende de opname); na de opname wordt de boodschap eenmaal afgespeeld



keer terug naar de ruststand van de telefoon

Controleren eigen alarmboodschap:

8x



“NOODBOODSCHAP CONTROLEREN”
op display: [BOODSCHAP CONTR.]



de alarmboodschap wordt afgespeeld



keer terug naar de ruststand van de telefoon

Wissen eigen alarmboodschap:

8x



“NOODBOODSCHAP CONTROLEREN”
op display: [BOODSCHAP CONTR.]



de alarmboodschap wordt afgespeeld



druk, tijdens het afspelen van de alarmboodschap, op de wis-toets (ⓧ); de eigen alarmboodschap is nu gewist en de voorgeprogrammeerde alarmboodschap is nu weer geactiveerd



keer terug naar de ruststand van de telefoon

Belangrijke tips:

Alarmnummers:

- * in het geval van alarm worden alleen de nummers gekozen die u ingesteld heeft als alarmnummer; zie pagina 14 in het geval u de alarm-volgorde wilt wijzigen en/of alarmnummers wilt toevoegen of verwijderen
- * zijn er geen nummers geprogrammeerd in het geheugen of ingesteld als alarmnummer, dan zal alleen het alarmsignaal op de eigen telefoon gedurende 15 seconden klinken
- * de nummers die u onder de direct geheugentoetsen **M1** en **M2** heeft geprogrammeerd, worden NIET gekozen in een alarmsituatie

Alarmboodschap:

- * de maximale lengte voor uw alarmboodschap bedraagt 20 sec., stel deze tekst eerst op papier op en spreek deze rustig in de ingebouwde microfoon
- * behalve uw naam is het van belang om in de alarmboodschap de instructie mee te nemen om de alarm-oproep te accepteren door het cijfer 0 te kiezen, alleen dan ontstaat er namelijk een handenvrije verbinding tussen uw telefoon en de telefoon van de opgebeldde persoon

Afstandbediening:

- * u kunt de alarmfunctie via de afstandsbediening alleen inschakelen indien u binnen het ontvangstbereik van de telefoon bent
- * het is te adviseren om regelmatig de werking van de afstandsbediening te controleren; niet vergeten om binnen 15 seconden de hoorn van uw telefoon even op te nemen en neer te leggen om het alarm weer uit te schakelen

Alarmopvolging:

- * stel iedereen waarvan u het telefoonnummer als alarmnummer heeft ingesteld, op de hoogte van uw alarmtelefoon en hoe er in geval van alarm gereageerd dient te worden (zie ook de uitklappagina voorin in deze gebruiksaanwijzing)
 - de opgebeldde persoon dient binnen 60 seconden op zijn telefoon (*) op toets -0- te drukken, uw telefoon schakelt nu gedurende 3 minuten de luidsprekerfunctie in
 - als binnen deze 3 minuten de opgebeldde persoon op zijn telefoon (*) op toets -1- en dan op toets -2- drukt, dan wordt de alarmfunctie van uw telefoon uitgeschakeld en blijft de handenvrije verbinding **CONTINU** in stand; wordt er niet op toets -1- en op toets -2- gedrukt binnen deze 3 minuten, dan wordt de verbinding verbroken en wordt het volgende nummer op de alarmlijst gekozen
 - ook indien er in het geheel niet op de oproep gereageerd wordt, dan wordt het volgende alarmnummer gekozen

ATTENTIE: indien de opgebeldde persoon na het intoetsen van 0-1-2 de verbinding verbreekt, neem dan op uw telefoon even de hoorn op en leg deze weer neer om uw telefoon te resetten.


U voorkomt hiermee dat uw telefoonaansluiting in gesprek blijft!

*:let op dat dit een DTMF of toon-telefoon moet zijn (u hoort toontjes bij het indrukken van een cijfer-toets)

OPROEPLIJST (CLIP)

Weergave op het display:

De volgende informatie kan op het display verschijnen bij het ontvangen van oproepen en/of het raadplegen van de oproeplijst:

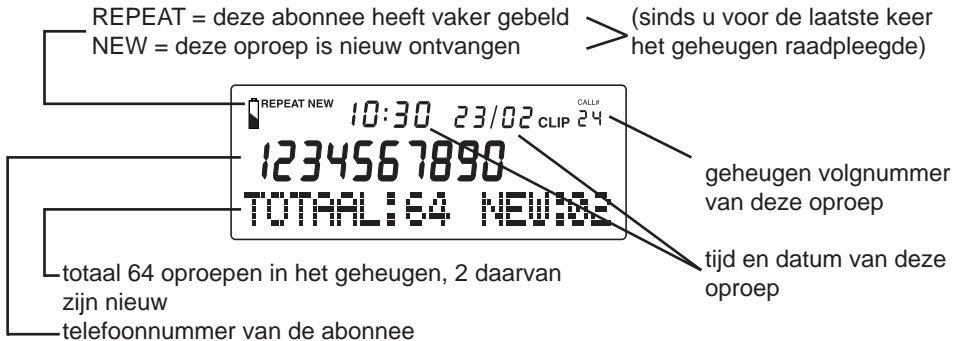

Oproeplijst openen:

Indien het lampje rechtsboven op de telefoon knippert, dan zijn er nieuwe oproepen ontvangen sinds de laatste keer dat u het geheugen raadpleegde.

1x / 2x



druk 1 of 2x op toets **CLIP** zodat "OPROEPLIJST" klinkt



blader door het geheugen

Terugbellen:



open de oproeplijst en zoek het te kiezen nummer op



de handenvrij-functie wordt ingeschakeld en het nummer wordt gekozen (de hoorn opnemen om het gesprek via de hoorn voort te zetten)

Kopiëren naar het geheugen:



open de oproeplijst en zoek het te kopiëren nummer op

3 sec



“NUMMER OPSLAAN?”

op display: [KOPIE GEHEUGEN]



“BEWAARD”

op display: [BEWAARD]

Geheugen wissen:

wissen per oproep:



open de oproeplijst en zoek de te wissen oproep op



“WISSEN?”

op display: [WISSEN?]



“GEWIST”

wissen gehele oproeplijst



open de oproeplijst en zorg dat er een nummer in het display verschijnt



“WISSEN?”

op display: [WIS ALLES]



na 2 seconden: *“GEWIST”*
gevolgd door *“LEEG”*

Tips & specificaties betreffende de oproeplijst:

- Indien het netwerk dit ondersteunt of indien u dit nummer samen met een naam in het telefoonboek-geheugen van de telefoon heeft geprogrammeerd, dan wordt ook deze naam op het display getoond. Indien u een naam heeft ingesproken, dan wordt deze naam tevens uitgesproken.
- Voor een correcte weergave van de naam uit het telefoongeheugen is het van belang dat het geprogrammeerde telefoonnummer identiek is aan het nummer dat u ontvangt, dus inclusief het netnummer.
- Indien het display *[ONBEKEND]* weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd.
- De geheugencapaciteit van de oproeplijst bedraagt 64 oproepen. Is het geheugen vol, dan zal bij elke volgende oproep, de oudste oproep uit het geheugen worden verwijderd.

INSTELLINGEN

Display contrast:

1x



“DISPLAY CONTRAST INSTELLEN”
op display: [DISPLAY CONTRAST]



druk op toets **OK**, de huidige instelling
verschijnt in het display



wijzig de instelling
1 = contrast laag
5 = contrast hoog



leg de instelling vast



keer terug naar de ruststand van de telefoon

Tijd en datum:



“TIJD / DATUM INSTELLEN”

op display: [TIJD/DATUM]



de uren-weergave knippert



stel de uren in



de minuten-weergave knippert



stel de minuten in



de datum-weergave knippert



stel de datum in



de maand-weergave knippert



stel de maand in



leg de tijd en de datum vast



keer terug naar de ruststand van de telefoon

Display taal: (let op, dus niet de gesproken taal)

3x



“TAAL INSTELLEN”

op display: [TAAL]



de huidig ingestelde taal verschijnt in het display
(achter deze taal staat een sterretje (*))



selecteer de gewenste display taal



leg de taal vast en keer terug naar de
ruststand van de telefoon

Stembegeleiding:

4x



“SPRAAK AAN / UIT”

op display: [SPRAAK]



de huidige instelling verschijnt in het display
(achter deze taal staat een sterretje (*))



selecteer de gewenste taal (selecteer
[SPRAAK UIT] om de stembegeleiding uit te
schakelen)



leg de keuze vast

FLASH verbrekingstijd:

Deze functie, waarbij de verbinding kort onderbroken wordt, wordt gebruikt om op sommige huiscentrales een gesprek door te verbinden of om extra telecomfuncties, bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te activeren. De standaard verbrekingstijd is 100mS en deze is reeds vanaf de fabriek ingesteld.

9x



"FLASH INSTELLING"

op display: [FLASH]



de huidige verbrekingstijd verschijnt in het display



selecteer de gewenste verbrekingstijd



leg de instelling vast en keer terug naar de ruststand van de telefoon

TOON / PULS kiezen:

Naar keuze kunt u de telefoonnummers met toontjes (DTMF) of met pulsen (draaischijfsysteem) kiezen.

Toonkiezen is in vrijwel de gehele Benelux gestandaardiseerd en is reeds vanaf de fabriek ingesteld..



“TOON PULS KIEZEN”

op display: [TOON/PULSKIEZEN]



de huidige instelling verschijnt in het display



selecteer de gewenste kies-modus



leg de keuze vast en keer terug naar de ruststand van de telefoon

Afstandsbedieningen aan- en afmelden:

Met deze functie kunt u (defecte of verloren) afstandsbedieningen afmelden. Tevens kunt u extra (*) afstandsbedieningen aanmelden zodat meerdere personen via deze telefoon alarm kunnen geven.



“ALARMKNOP INSTELLEN”

op display: [ALARMKNOP]



[VERBINDEN]



gebruik de pijltoetsen om te wisselen tussen [VERBINDEN] en [WISSEN?]

Afstandsbedieningen toevoegen

VERBINDEN zorg dat de keuze [VERBINDEN] in het display staat



druk op de rode SOS-toets van de (nieuwe) afstandsbediening en houd deze toets ingedrukt



druk op de telefoon op de **OK**-toets

VERBONDEN zodra het display [VERBONDEN] aangeeft, is de afstandsbediening geactiveerd



keer terug naar de ruststand van de telefoon

Afstandsbedieningen afmelden

WISSEN zorg dat de keuze [WISSEN?] in het display staat



druk op de telefoon op de **OK**-toets

alle afstandsbedieningen zijn nu afgemeld

ATTENTIE:

Let op dat u niet per abuis afstandsbedieningen afmeld.

Druk na het aanmelden gedurende 3 seconden op de rode SOS-toets om de nieuwe afstandsbediening op zijn correcte werking te testen. Neem binnen 15 seconden de hoorn van uw telefoon op en leg deze weer neer om het alarm uit te schakelen. Bij het gebruik van meerdere afstandsbedieningen dienen deze allemaal op deze wijze gecontroleerd te worden.

*: Losse afstandsbedieningen zijn verkrijgbaar via de FYSIC servicedienst, telefoon 073-6411355.

Tot maximaal 5 afstandsbedieningen kunnen aangemeld worden.

INSTALLATIE


Back-up batterijen telefoon:

Om bij uitval van de 230V of van de adapter over alle telefoonfuncties te kunnen beschikken, dient u 4 batterijen te plaatsen.

1. neem de telefoonstekker uit de telefooncontactdoos
2. gebruik een puntig voorwerp om de batterijdeksel aan de onderzijde van de telefoon los te nemen
3. plaats 4 stuks AA, 1.5V alkaline batterijen zoals aangegeven in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
4. plaats de batterijdeksel terug op de telefoon


Afhankelijk van de kwaliteit van de batterijen, kunnen deze batterijen de telefoon 12 uren of meer van spanning voorzien

LET OP: ZIJN DE BATTERIJEN NIET GEPLAATST OF ZIJN DEZE LEEG EN IS DE ADAPTER NIET AANGESLOTEN, DAN KUNT U NOG WEL VIA DE HOORN TELEFONEREN. ALLE ANDERE FUNCTIES, INCLUSIEF DE ALARMFUNCTIE, ZIJN NIET MEER TE GEBRUIKEN

Zodra het symbool  in het display oplicht, zijn de batterijen aan vervanging toe. Volg de bovenstaande instructies 1-4 om nieuwe batterijen te plaatsen. Vervang altijd alle batterijen tegelijk.

- Plaats alleen gelijkwaardige Alkaline batterijen van 1,5Volt.
- Opladbare batterijen zijn door de lagere spanning niet bruikbaar in deze telefoon.

- De geheugens en de opgenomen namen en boodschappen worden in flash-geheugenchips opgeslagen die geen back-up voeding nodig hebben. Deze geheugens worden dus niet gewist bij lege batterijen.

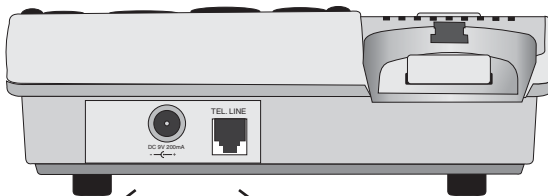

Voedingsadapter:

1. plug het kleine stekkertje aan het adaptersnoer achter in de telefoon in aansluiting DC 9V 200mA
2. de adapter in een 230Volt stopcontact doen.
Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.

Telefoonsnoer:


1. plug het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de telefoon in aansluiting TEL.LINE; het stekkertje aandrukken totdat deze vastklikt
2. de telefoonstekker in een telefoonwandcontactdoos steken

Hoorn:

1. de hoorn met de telefoon verbinden door één zijde van het kruisnoer onder in de hoorn te klikken en de andere zijde aan de linkerzijde van de telefoon te klikken
2. de stekertjes aandrukken totdat deze vastklikken

Wandmontage:


1. boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8,3cm 2 gaten in de wand en plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitsteken
2. klik de muurbeugel volgens de nevenstaande tekening aan de onderzijde van de telefoon (1) en duw deze naar boven (2)

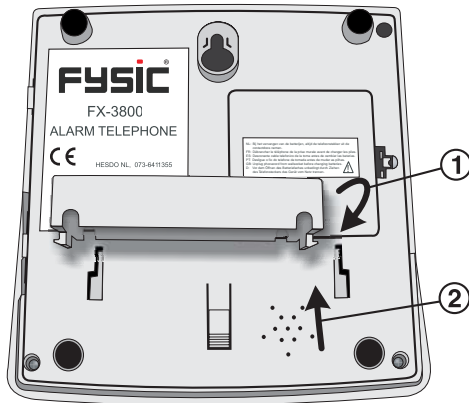

3. schuif de hoornhanglip uit de telefoon, draai deze 180^o en plaats deze terug in de telefoon; dit lipje houdt de hoorn vast bij hangend gebruik
4. hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk de telefoon naar onderen
5. het telefoon- en adaptersnoer met kabelbeugeltjes aan de wand fixeren



De wandbeugel kan afgenomen worden door het borglipje (1) in te drukken en de beugel naar onder uit de telefoon te schuiven (2).

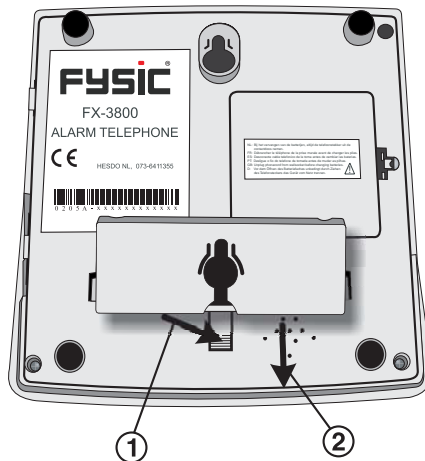

Batterij in afstandsbediening:

TIP: controleer regelmatig, bijvoorbeeld eens per maand, de batterijconditie door ruim een seconde op de alarm-toets te drukken. De telefoon moet nu alarm geven. Neem binnen 15 seconden de hoorn even op en leg deze weer neer om het alarm uit te schakelen.

Als het alarm niet klinkt en/of het rode lampje op de afstandsbediening licht niet of zwak op, dan dient de batterij vervangen te worden.

1. open de afstandsbediening door het kleine kruiskopschroefje aan de achterzijde los te draaien en de afstandsbediening open te klappen (zie fig. 1)
2. verwijder de oude, uitgewerkte, 12 Volt batterij en plaats een nieuwe zoals op de afbeelding staat aangegeven (zie fig. 2)
3. sluit de afstandsbediening en plaats het schroefje terug

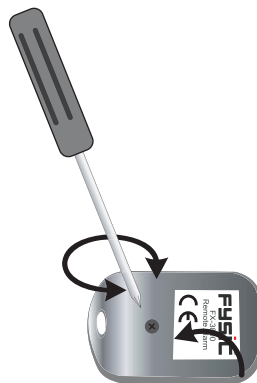


fig. 1

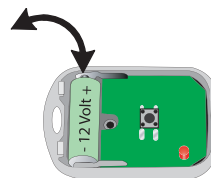


fig. 2

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS

Systeemcontrole:

- * Het is van groot belang dat u regelmatig, bij voorkeur 1x per maand op een vast tijdstip, de alarmfunctie van de afstandsbediening en van de telefoon test. Let daarbij ook op het duidelijk oplichten van het rode lampje op de afstandsbediening (licht het lampje zwak op, vervang dan de batterij). Vergeet hierbij niet de opgebelde personen in te lichten dat het hier een test betreft.

Algemeen:

- * Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- * Bij het reinigen van de telefoon dient u de adapter uit het stopcontact te nemen en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- * Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- * Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- * Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- * Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- * De telefoon en/of de voedingsadapter nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:

- * Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- * Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- * Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- * Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

Plaatsing:

- * De telefoon wordt gevoed via een voedingsadapter. Op de plaats waar de telefoon komt, moet dus ook een 230 Volt wandcontactdoos aanwezig zijn.
- * Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- * Plaats deze telefoon niet in de directe nabijheid van draadloze telefoons, elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladings-lampen. De uitgestraalde radiogolven van deze producten kunnen het ontvangen van het alarmsignaal van de afstandsbediening verstoren.

Lichtnetuitval:

- * In geval van uitval van de lichtnetspanning, verzorgen batterijen (indien geplaatst) de volledige werking van deze telefoon, inclusief Alarm-functie, gedurende meer dan 12 uur (afhankelijk van soort en kwaliteit van de batterijen).

Afstandsbediening:

- * Het bereik van de afstandsbediening bedraagt tot 50 meter. Dit bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden.
- * Voor een optimaal bereik dient de telefoon centraal in het pand of uw woning opgesteld te staan, zo min mogelijk gehinderd door stalen constructies, wanden, vloeren, etc.

Gehoerversterking / gehoorapparaten (HAC):

- * De hoorn van deze telefoon is geschikt voor dragers van gehoorapparaten (geïntegreerde ringspoel).

Bellen via een huis- of kantoorcentrale:

- * Het is af te raden deze alarmtelefoon achter een huis- of kantoorcentrale te plaatsen waarbij eerst een 0 of ander voorloopcijfer gekozen moet worden voor de buitenlijn.

De reden hiervoor is dat gedurende een spanningsuitval deze 0 vaak niet gekozen hoeft te worden maar de telefoon deze 0 wel kiest. Een verkeerde verbinding is dan het gevolg.

Milieu:

- * De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- * Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.



- * Op het einde van de levenscyclus van deze telefoon mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het nevenstaand symbool.



Onderhoud:

- * Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- * Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT


De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM



NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan echter een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn. Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

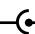Kiezen.....	DTMF (toon) & puls
R/FLASH	80 / 100 / 270 / 300 / 600mS
Systeem oproeplijst	DTMF & FSK (automatische detectie)
Voeding telefoon.....	9V DC 200mA (- —  +) (via voedingsadapter)
Back-up voeding telefoon	4 x 1,5 Volt penlite AA batterij
Gebruiksduur op back-up batterijen ..	>12 uur (Alkaline batterijen)
Voeding afstandsbediening	12 Volt batterij (28 x 10mm)
Frequentie afstandsbediening	868.350 MHz
Gebruikstemperatuur:.....	0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur:.....	-20°C tot 60°C

MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

<p>Telefoon doet niets / kan geen nummers kiezen.</p>	<p>Controleer de aansluiting met de telefoonwandcontactdoos en met de voedingsadapter, controleer of de batterijen geplaatst en vol zijn.</p>
<p>Display slecht of niet leesbaar.</p>	<p>Controleer de aansluiting met de voedingsadapter en controleer of de batterijen geplaatst en vol zijn.</p> <p>Controleer de instelling voor het display-contrast (zie pagina 30).</p>
<p>Kan geen alarm geven via de afstandsbediening.</p>	<p>U bent buiten bereik van de telefoon. Verklein de afstand.</p> <p>Controleer de batterijen van de afstandsbediening (licht het rode lampje goed op bij het indrukken van de alarm-toets?).</p>
<p>Er worden geen nummers gekozen in een alarm-situatie.</p>	<p>Er zijn geen nummers in het telefoonboek-geheugen geprogrammeerd of deze nummers zijn niet ingesteld als 'alarmnummer'.</p>

Zwak handenvrij geluid.	De volumeregelaar (aan de rechterzijkant van de telefoon) staat op een te laag nivo. Verhoog het volume.
Geen stembegeleiding bij de geheugens en bij het programmeren.	U heeft deze uitgeschakeld (zie pagina 33). Het volume staat te laag, verhoog dit (zie de schuifregelaar aan de rechterzijde van de telefoon).
Uw telefoon reageert niet op de -0-, -1- of -2- die de opgebeldde persoon moet intoetsen om uw alarmoproep te accepteren	De opgebeldde persoon heeft een puls-telefoon die op het draaischijfprincipe is gebaseerd (ratelend geuid in de hoorn bij het kiezen van een nummer). De FX-3800 reageert alleen op de toontjes van een toon-telefoon (u hoort toontjes bij het kiezen van een nummer)

Indien het probleem niet kan worden opgelost door de bovenbeschreven mogelijke oplossingen, neem dan de voedingsadapter en het telefoon snoer los van de telefoon en verwijder de batterijen (de geheugens blijven gedurende deze spanningsloze toestand bewaard). Sluit alles na ruim 20 minuten weer aan.

In het geval de storing nu niet is verholpen, neem dan contact op met de Fysic servicedienst op telefoonnummer 073-6411355 of met de leverancier van deze telefoon.

INHOUDSOPGAVE

INTRODUCTIE	2
OVERZICHT TELEFOON	4
OVERZICHT DISPLAY	5
TELEFONEREN:	
Belvolume	6
Oproep aannemen	6
Verbinding verbreken	6
Nummer kiezen	7
Gespreksvolume	8
Nummerherhaling	8
Kiespauze	8
R-toets (Flash)	9
Ruggespraak	9
Gesprekstimer.	9
TELEFOONBOEK:	
Toevoegen	10
Telefoonboek openen	12
Geheugen kiezen	13
Geheugen wissen	13
Geheugen corrigeren / wijzigen	14
Gesproken naam bij geheugens toevoegen of wijzigen	15
Gesproken naam bij geheugens wissen	15
Tips en opmerkingen betreffende de geheugens	16

DIRECT GEHEUGEN M1 EN M2

Geheugen programmeren.	18
Geheugen kiezen	19
Geheugen corrigeren	19
Geheugen wissen	19
Specificaties.	19

ALARMFUNCTIE:

Werking	20
Alarmboodschap	22
Voorgeprogrammeerde alarmboodschap	22
Opnemen eigen alarmboodschap.	22
Controleren eigen alarmboodschap.	23
Wissen eigen alarmboodschap	23
Belangrijke tips:	
Alarmnummers.	24
Alarmtekst	24
Afstandbediening	25
Alarmopvolging	25

OPROEPLIJST: (CLIP)

Weergave op het display	26
Oproeplijst openen	26
Terugbellen	27
Kopiëren naar het geheugen	27
Geheugen wissen	28
Tips & specificaties betreffende oproeplijst	29

INSTELLINGEN:

Display contrast	30
Tijd en datum	31
Display taal	32
Stembegeleiding	33
FLASH verbrekingstijd	34
TOON / PULS kiezen	35
Afstandsbediening aan- en afmelden	36

INSTALLATIE:

Back-up batterijen telefoon	38
Voedingsadapter	39
Telefoonsnoer	39
Hoorn	40
Wandmontage.	40
Batterij in afstandsbediening	42

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS:

Systeemcontrole	43
Algemeen	43
Installatie	44
Plaatsing	44
Lichtnetuitval	44
Afstandsbediening	45
Gehoerversterking / gehoorapparaten (HAC).	45
Bellen via een huis- of kantoorcentrale	45
Milieu	45
Onderhoud	46

VERKLARING VAN CONFORMITEIT	46
NETWERKCOMPATIBILITEIT	47
TECHNISCHE SPECIFICATIES	47
MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	48
ALARMLIJST.	54
GARANTIEBEWIJS	55

ALARMLIJST

Noteer hier in volgorde de personen die gebeld worden in geval van alarm:

volg-orde:	naam:	telefoon-nummer:

volg-orde:	naam:	telefoon-nummer:

GARANTIEBEWIJS

Naam: _____ Bewaar hier uw
Adres: _____ kassa- of aankoop
Postcode / plaats: _____ bon
serienummer: _____

Op de FYSIC FX-3800 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van FYSIC op telefoonnummer 073 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, bliksemingslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service Help



FYSIC®



NL: 073 6411 355
INT: +31 (0) 73 6411 355

ALARMACTIVATIE EN AFHANDELING FX-3800

1.  (op toestel of op afstandsbediening) 1 seconde indrukken

2. 15 seconden klinkt het alarm alleen lokaal




3.  na 15 seconden wordt het 1^e alarmnummer gekozen


4. de alarmtekst wordt afgespeeld



5.  de 'andere kant' moet binnen 60 sec. op zijn telefoon op toets 0 drukken

6. u heeft nu 3 minuten lang een handenvrije verbinding

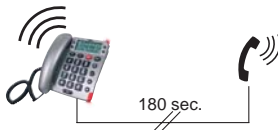

7.  de 'andere kant' moet binnen deze 3 minuten op zijn telefoon op toets 1 en dan op toets 2 drukken

8. de telefoonverbinding blijft nu openstaan en u kunt hulp bespreken

als dat niet gebeurt dan kiest de telefoon het volgende nummer op de alarmlijst


Indien u het volgende kaartje kopieert en uitdeelt aan iedereen die u op uw alarmlijst heeft staan, dan weten zij hoe er gereageerd moet worden in het geval van een alarmmelding.


ALARMKAART VAN:

1.  Dit is een alarmboodschap van
Druk op toets 0 om dit alarm te accepteren
- u wordt opgebeld en hoort de alarmboodschap

2.  druk op uw telefoon op toets 0

3. u kunt hulp bieden:

-  druk op toets 1

-  druk op toets 2

het alarm stopt en de verbinding blijft nu open

bij aankomst bij de persoon in nood de hoorn even opnemen en neerleggen om de telefoon te resetten

u kunt geen hulp bieden:

verbreek de verbinding,

de alarmtelefoon belt na 3 minuten het volgende nummer op de alarmlijst



FYSIC[®]