

Gebruiksaanwijzing Mode d'emploi



Alecto[®]

BLX-10

INTRODUCTIE

Met de BLX-10 kunt u de hartslag, hikjes en schopjes van uw ongeboren baby beluisteren. Dankzij de dubbele uitgang kunt u samen met uw partner genieten van deze geluiden. Met het meegeleverde opnamesnoertje kunt u de geluiden op een cassetterecorder opnemen of naar een PC kopiëren zodat u ze via het internet met uw familie en vrienden kunt delen.

Na de geboorte van uw baby kunt u uw eigen hartslag opnemen en deze vertrouwde geluiden voor de baby afspelen.

De BLX-10 werkt zonder trillingen of stralen en is absoluut veilig voor u en voor uw baby. U kunt de BLX-10 zo vaak gebruiken als u zelf wilt.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De Alecto BLX-10 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website
WWW.ALECTO.INFO



MILIEU



Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgewerkte batterijen niet weggooien maar inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).

INSTALLATIE

Batterij:



1. Schuif de batterijdeksel aan de voorzijde naar onderen weg.




2. Plaats de meegeleverde 9 Volt batterij zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven.




3. Schuif de batterijdeksel weer terug op de BLX-10.

Hoofdtelefoon:

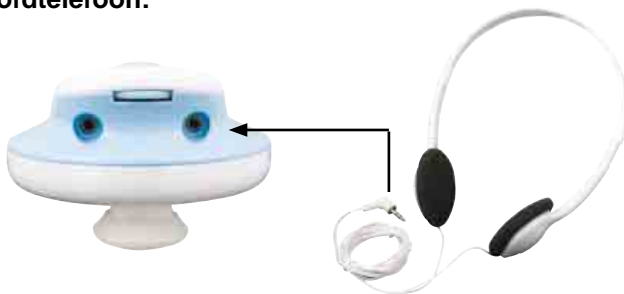

Verbind de meegeleverde hoofdtelefoon met een van de 2 aansluitingen van de BLX-10. In de andere aansluiting kunt u een 2^e hoofdtelefoon (exclusief) aansluiten zodat u samen met uw partner kunt luisteren.

Opnamesnoertje:

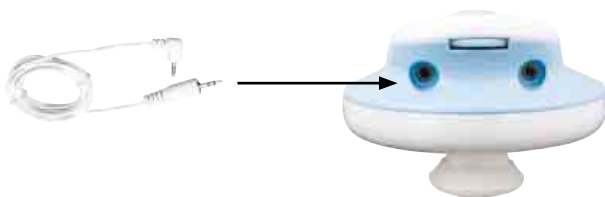

Om de geluiden van uw kindje op te nemen, verbindt u het opnamesnoertje met een van de aansluitingen op de BLX-10. De andere zijde van dit snoertje verbindt u met het opnameapparaat (cassetterecorder, computer, enz.). Sluit de hoofdtelefoon aan op de andere aansluiting van de BLX-10 zodat u kunt horen wat u opneemt.

GEBRUIKEN



1. Inschakelen:

U schakelt de BLX-10 in door de aan/uit/volumeregelaar naar rechts te draaien.



2. Aan/uit indicatie:

Na de klik licht het lampje op en is de BLX-10 ingeschakeld.



3. Geluidssensor inschakelen:

U schakelt de geluidssensor in door op de blauwe knop te drukken. Zodra u deze knop loslaat wordt de geluidssensor weer uitgeschakeld.



4. Volume:

Draai de volumeregelaar naar rechts voor een hoger volume; naar links draaien voor een lager volume.



5. Uitschakelen:

U schakelt de BLX-10 uit door de aan/uit/volumeregelaar naar links te draaien; voorbij de klik dooft het lampje en is het apparaat uitgeschakeld.

GEBRUIKSTIPS

Vanaf welke maand?

Vanaf ongeveer de 5^e maand zou u het hartje van de ongeboren baby kunnen horen. Dit is echter voor elk persoon verschillend.

Wat kunt u horen?

Het hartje van een ongeboren baby klopt ongeveer tussen de 120 en 160 keer per minuut, dit klinkt ongeveer als een galoperend paard. De hik-geluidjes klinken als 2 snelle drumslagen en de schopjes klinken als doffe slagen.

Beste locatie?

In een vroeg stadium van de zwangerschap is een goede locatie om het hartje te kunnen horen onderaan de buik, net boven de schaamstreek.

In een later stadium zal de hartslag iets verder naar boven gezocht moeten worden.

Tip: neem de BLX-10 mee naar de verloskundige om samen naar de meest geschikte plaats te zoeken.

Tijdstip om te luisteren?

Ongeveer 3 à 4 uur na de maaltijd is het geschiktste moment om te luisteren.

Geen gel gebruiken!

De BLX-10 werkt met een geluidssensor waarvoor u geen gel nodig heeft.

DISCLAIMER

De BLX-10 is geen medisch instrument en vervangt nooit de arts of verloskundige. Bij zorgen of vragen over uw zwangerschap dient u te allen tijde uw arts of verloskundige te raadplegen.

REINIGEN / ONDERHOUD

- * De BLX-10 is niet waterdicht. U dient de behuizing met alleen een licht vochtige doek te reinigen. Geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.
- * Bewaar de BLX-10 buiten bereik van kinderen op een veilige plaats.
- * Leg de BLX-10 niet in direct zonlicht.
- * Bij langdurig niet gebruiken (> 1 maand) is het raadzaam om de batterij te verwijderen.

GARANTIEBEWIJS

Op de Alecto BLX-10 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

Hoe te handelen:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de serviceafdeling van Alecto op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.

De garantie vervalt:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

INTRODUCTION

Le BLX-10 vous permettra d'écouter la pulsation, les petits hoquets et les petites pelles de votre bébé avant la naissance. Grâce à la sortie double, vous pouvez apprécier ces sons avec votre partenaire. Le petit cordon d'enregistrement livré vous permettra d'enregistrer ces sons sur un magnétophone ou de les copier sur votre pc afin que vous puissiez les partager avec votre famille ou vos amis.

Après la naissance de votre bébé, vous pouvez enregistrer votre propre pulsation et vous pouvez jouer ces sons familiers pour le bébé.

Le BLX-10 n'utilise ni des vibrations ni des radiations et il est absolument sûr pour vous et pour votre bébé. Vous pouvez utiliser le BLX-10 tellement souvent que vous voulez.

DECLARATION DE CONFORMITE

L'Alecto BLX-10 répond aux conditions et équipements essentiels comme décrits dans la directive européenne 1999/5/EC

La déclaration de conformité est disponible sur le site
WWW.ALECTO.INFO



MILIEU



Quand vous vous débarrassez de votre BLX-10, ne le jetez pas aux ordures ménagères, mais donnez-lui à un point de recyclage pour les appareils électriques et électroniques.

Ne jetez pas les piles agies mais donnez-les à votre dépôt local pour les petits déchets chimiques.

INSTALLATION

Pile :



1. Glissez le couvercle au devant vers le bas.



2. Mettez une pile de 9 Volt (inclusive) comme indiqué dans le compartiment de pile.




3. Remettez le couvercle sur le BLX-10

Casque d'écoute :



Connectez le casque d'écoute avec un des 2 branchements à votre choix du BLX-10. Il vous est possible de connecter un deuxième casque d'écoute (pas livré) afin que vous puissiez écouter avec votre partenaire.

Cordon d'enregistrement:

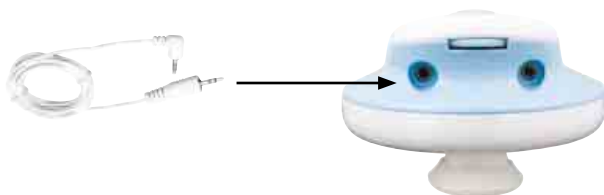

Afin que vous puissiez enregistrer les sons de votre bébé, connectez le petit cordon d'enregistrement avec un des branchements sur le BLX-10. Connectez l'autre côté de ce cordon avec votre appareil d'enregistrement (magnétophone, ordinateur, etc.). Branchez le casque d'écoute sur l'autre branchement du BLX-10 afin de pouvoir écouter ce que vous enregistrez.

UTILISER



1. Activer :

Vous pouvez activer le BLX-10 en tournant le régulateur de volume/marche/arrêt vers la droite.



2. Indication marche/arrêt :

L'indication marche/arrêt sera allumée après le clic et le BLX-10 est activé.



3. Activer senseur de son :

Vous pouvez activer le senseur de son en appuyant sur le bouton bleu. Dès que vous lâchez ce bouton, le senseur sera désactivé.



4. Volume :

Tournez le régulateur de volume vers la droite pour un volume plus fort, vers la gauche pour un volume moins fort.



5. Désactiver :

Vous désactiver le BLX-10 en tournant le régulateur de volume/marche/arrêt vers la gauche; après le clic, l'indication marche/arrêt éteindra et l'appareil a été désactivé.

CONSEILS D'USAGE

A partir de quel mois ?

Il sera possible d'écouter le cœur de votre bébé avant la naissance à partir du 5^{ième} mois. C'est toutefois différent pour tout le monde.

Que pouvez-vous entendre ?

Le cœur d'un bébé pulse avant la naissance entre 120 et 160 fois par minute, cela résonne comme un cheval galopant. Les hoquets résonnent comme 2 coups de batteries et les petites pelles comme des coups sourds.

Meilleure location ?

Au début de la grossesse, la meilleure place pour écouter le cœur est en bas du ventre, justement au dessus du pubis.

Après, il faut rechercher la pulsation un plus haut.

Conseil : emmenez le BLX-10 chez votre sage-femme pour trouver la meilleure place.

Moment pour écouter ?

Le meilleur moment pour écouter le bébé est environ 3 à 4 heures après le repas.

N'utiliser pas de gel !

Le BLX-10 a un capteur de son, donc il ne faut pas utiliser un gel.

DISCLAIMER

Le BLX-10 n'est pas un instrument médical et il ne peut jamais remplacer votre docteur ou votre sage-femme. En cas de doute ou si vous avez des questions concernant votre grossesse, contactez toujours votre docteur ou votre sage-femme.

NETTOYER/ENTRETIEN

- * Le BLX-10 n'est pas imperméable. Nettoyez l'extérieur seulement avec un torchon humide. N'utilisez pas des produits récurants ou agressifs.
- * Gardez le BLX-10 hors portée des enfants à un endroit sûr.
- * Ne mettez pas le BLX-10 dans le soleil.
- * Si vous ne l'utilisez pas pour longtemps (> 1 mois), reprenez la pile.

BON DE GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat sur l'Alecto BLX-10. Pendant cette période, nous vous assurons une réparation gratuite des défauts causés par des défauts de construction ou de matériaux. Cela au jugement de l'importateur.

COMMENT AGIR:

Si vous constatez un défaut, il faut d'abord consulter le mode d'emploi. Si cela ne vous sert à rien, il faut consulter votre fournisseur ou la Service Après Vente d'Alecto au numéro 31 (0) 073 6411 355.

LA GARANTIE ÉCHOIT:

En cas d'une utilisation incompétente, d'un raccordement fautif, d'une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l'appareil sans emballage approprié ou dans le cas où l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et le bon d'achat.

Toute autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est exclue.

Service



Help



Alecto[®]
Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch



+31 (0) 73 6411 355